

Mode d'emploi du test d'autodépistage rapide à domicile des antigènes de la COVID-19 Rapid Response^{MC} de BTNX


Ce document présente l'utilisation de la trousse d'autodépistage de la COVID-19 Rapid Response^{MC} de BTNX. Avant de commencer:

- Si vous présentez des symptômes de la COVID-19 ou si vous avez été en contact avec une personne atteinte de la COVID-19, n'utilisez PAS cette trousse et faites-vous plutôt tester dans un centre de dépistage désigné ou un laboratoire communautaire (centres de dépistage de la COVID-19 [ontario.ca]).
- Assurez-vous que votre trousse contient tous les composants nécessaires (voir l'étape 2) et qu'aucun des éléments n'est endommagé ou n'a dépassé sa date limite d'utilisation.
- Le test d'antigène de la COVID-19 Rapid Response^{MC} de BTNX peut être effectué à l'aide d'un écouvillon nasal antérieur (conformément à la notice d'emballage, tel qu'approuvé par Santé Canada) ou à l'aide d'un écouvillonnage nasal profond (comme recommandé par Santé publique Ontario dans ce document, étant donné une sensibilité plus élevée que l'écouvillonnage nasal antérieur). Les deux types de prélèvement d'échantillons peuvent être effectués à l'aide de l'écouvillon nasopharyngés (NP) fourni avec la trousse.
- Pour plus d'information sur l'utilisation du BTNX avec un échantillon nasal antérieur, les utilisateurs peuvent se référer à la notice du produit ou à une vidéo produite par le fabricant (à noter que cette vidéo ne décrit pas l'auto-écouvillonnage) : [tps://www.youtube.com/watch?v=F7m8L6Tq498](https://www.youtube.com/watch?v=F7m8L6Tq498).
- Vous pouvez également visionner une vidéo d'instructions générales sur la façon d'effectuer l'autodépistage à la maison ici : <https://www.youtube.com/watch?v=XP3aqwO5rJo>.
- Entrez la trousse et son contenu à température ambiante (ni au réfrigérateur ni au congélateur) et à l'abri de la lumière du soleil.
- Trouvez un endroit propre, loin de toute nourriture, boisson et de désordre, et facile à nettoyer en cas de fuite.
- Au cours du test, abstenez-vous de manger, de boire, de fumer, de vapoter, de mettre des lentilles de contact, de mettre du maquillage ou de toucher votre visage de quelque façon que ce soit.
- Ce test est réservé à votre usage personnel, sauf si vous êtes un parent/tuteur dont l'enfant est testé. Le ministère de la Santé a approuvé l'utilisation de ces tests par les tuteurs pour leurs enfants à la maison et ces instructions peuvent aider un parent à aider son enfant. Pour toute autre question, veuillez communiquer avec votre bureau de santé publique local.


1 Mouchez-vous, puis lavez-vous les mains pendant au moins 20 secondes.

2 Rassembler le matériel contenu dans la trousse pour votre test.

Il comprend :

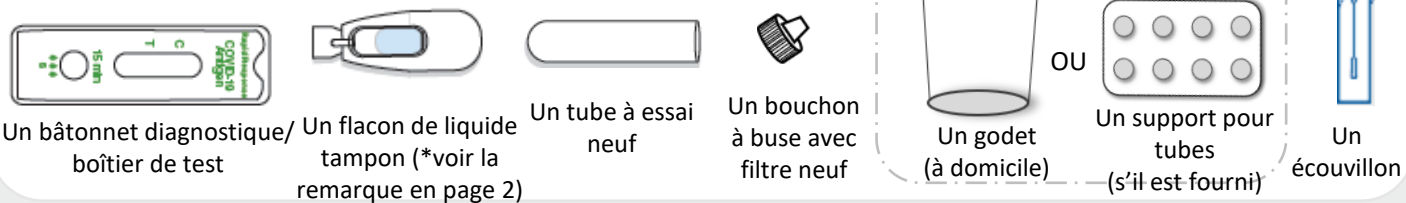

3 Préparez votre zone de travail pour le test.

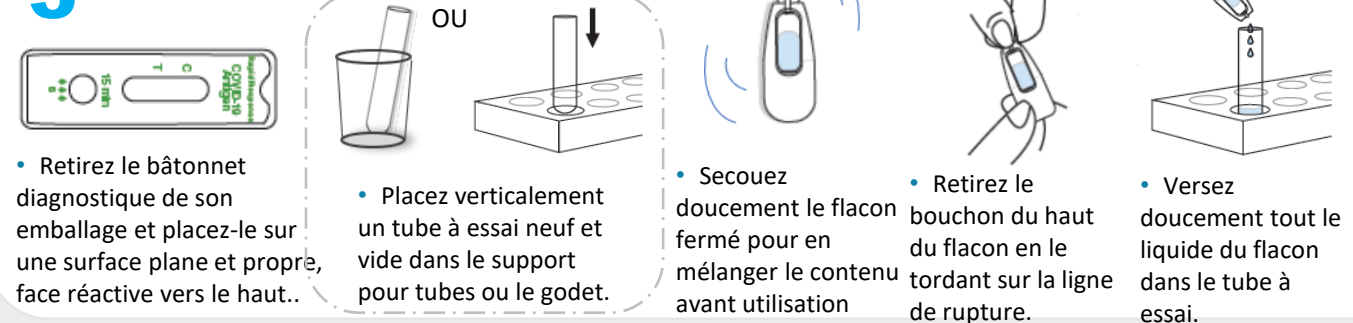

Mode d'emploi du test d'autodépistage rapide à domicile des antigènes de la COVID-19 Rapid ResponseMC de BTNX




4 Passez l'écouvillon dans vos deux narines.

- Retirez l'écouvillon de son emballage, en maintenant l'extrémité d'écouvillonnage loin de vos mains et de toute autre surface.
- Inclinez votre tête vers l'arrière et insérez l'écouvillon sur un axe droit (pas vers le haut) dans une de vos narines. Arrêtez-vous quand vous ressentez une résistance ou une fois l'écouvillon introduit sur 2,5 cm (cette distance est plus courte pour les enfants de moins de 12 ans).
- Faites tourner l'écouvillon contre la paroi interne de votre narine 5 à 10 fois.
- Retirez l'écouvillon et répétez l'opération dans la seconde narine.




5 Mélangez l'échantillon avec le liquide dans le tube.

- Immergez entièrement l'extrémité de l'écouvillon, et faites le tourner doucement pour mélanger la solution. Évitez les éclaboussures.
- Laissez l'écouvillon dans le tube et appuyez l'extrémité de l'écouvillon contre les parois du tube pendant 10 à 15 minutes.
- Laissez l'écouvillon dans le tube, remplacez le tube sur le support pour tubes ou dans le godet et laissez agir pendant 2 minutes.
- Pincez le tube d'une main et de l'autre, tirez sur l'écouvillon pour le retirer du tube.
- Mettez l'écouvillon aux ordures.

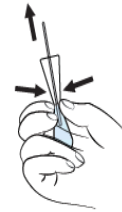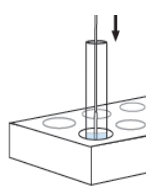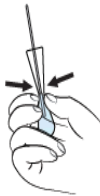


6 Procédez au test et attendez 15 minutes avant de lire les résultats.

- Fixez fermement le bouchon à buse sur le tube à essai. Assurez-vous que le bouchon à buse est bien fixé pour éviter toute fuite.

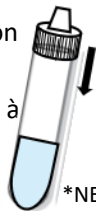

- Retournez le tube au-dessus sur la surface ronde réservée à l'échantillon, puis appuyez doucement sur le tube pour en faire tomber trois gouttes dans la zone prévue à cet effet (NE versez PAS les gouttes dans la fenêtre de résultat).
- Réglez un minuteur sur 15 minutes.*

*NE lisez PAS les résultats avant que 15 minutes se soient écoulées ni après 20 minutes les résultats pourraient être incorrects.

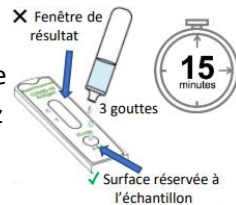

7 Lisez le résultat. Peu importe quelle ligne est la première à apparaître, ou la netteté des




- Si seule la ligne de contrôle (C) apparaît, le résultat est négatif.



- Si la ligne de contrôle (C) et la ligne de test (T) apparaissent, le résultat est positif.



- Si la ligne de contrôle (C) n'apparaît pas, le résultat n'est pas valide (c.-à-d. que le test n'a pas fonctionné).

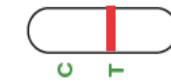

8 Tirez les conclusions du résultat pour agir rapidement.

- Si le résultat est négatif, il est moins probable que vous soyez atteint de la COVID-19. Vous pouvez reprendre vos activités normales, dans le respect de l'ensemble des consignes de santé publique.
- Si le résultat est positif, vous êtes peut-être atteint de la COVID-19 : il est recommandé d'obtenir un test en laboratoire auprès d'un centre d'évaluation ou d'un laboratoire communautaire dès que possible pour confirmer le résultat. Placez-vous immédiatement en auto-isolement jusqu'à la réception du résultat de votre test en laboratoire.
- Si le test n'est pas valide, répétez l'opération avec un écouvillon et un bâtonnet diagnostique neuf. Vous devrez à nouveau recueillir un échantillon dans votre nez conformément aux instructions.

9 Mettez le matériel de test aux ordures et lavez-vous les mains. Ne réutilisez pas le matériel (à l'exception du support pour tubes).

Ressources supplémentaires

- [Outil d'auto-évaluation pour la COVID-19](#)
- [Autodépistage : information sur le dépistage et les centres de dépistage de la COVID-19](#)
- [Autodépistage de la COVID-19](#)

*Remarque : Tous les produits distribués sont approuvés par Santé Canada et, lorsqu'ils sont utilisés conformément aux instructions, ils ne représentent pas de risque pour la santé des Ontariens. S'il n'est pas utilisé correctement (par exemple, si le liquide tampon pénètre dans vos yeux ou votre bouche), rincez abondamment à l'eau pendant 15 minutes et communiquez avec votre fournisseur de soins de santé ou le Centre antipoison de l'Ontario au 1 800 268-9017 ou au 416 813-5900. Si le liquide tampon entre accidentellement en contact avec votre peau, lavez la zone avec beaucoup d'eau. Le liquide tampon est livré dans un flacon divisé et scellé, ce qui réduit la nécessité de le manipuler ainsi que le risque de l'utiliser de manière incorrecte.